


SONAR

携帯用磁気誘導無線アンプセット HS-60

取扱説明書

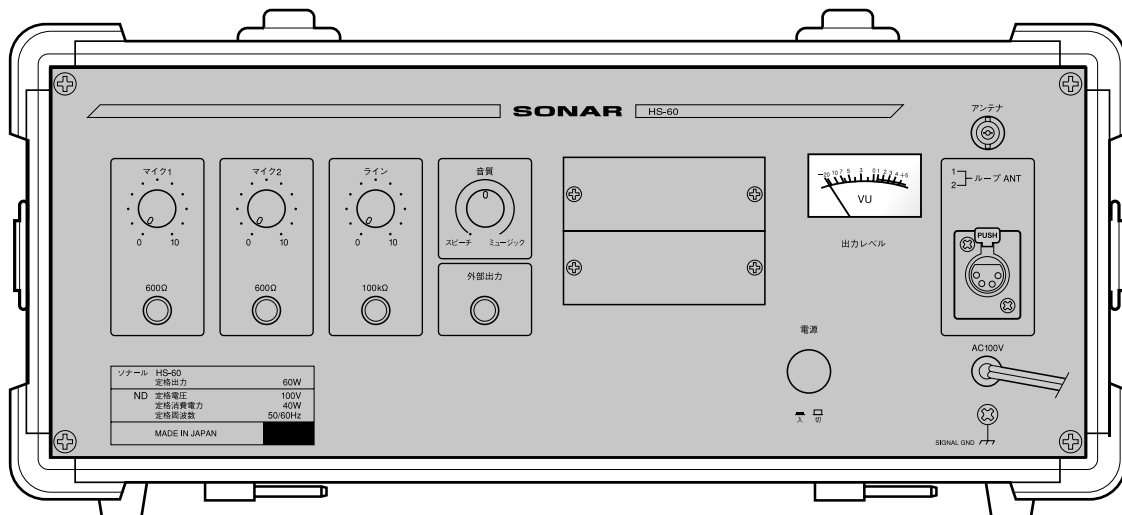

このたびは ソナール HS-60セットをお買上げいただき誠にありがとうございます。


ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。

この取扱説明書は大切に保管し、後日わからないことがあれば再びご覧ください。

設置使用上のご注意


- ◎持ち運びのときは確実に蓋をしめてください。
- ◎本機は精密な電子機器です。衝撃を加えるような手荒なお取扱はしないでください。
- ◎直射日光の当たるところや、温度、湿度の高くなる場所には設置しないでください。
- ◎本機は防水構造になっていませんので、雨や水などがかからないように注意してください。
- ◎電源コードを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると断線することもあり危険です。
- ◎静電気対策のためにも接地することをお勧めします。水道管、ガス管には絶対にアースしないでください。
- ◎本機の改造はしないでください。感電などの事故の原因となることがあります。

各部の名称と説明

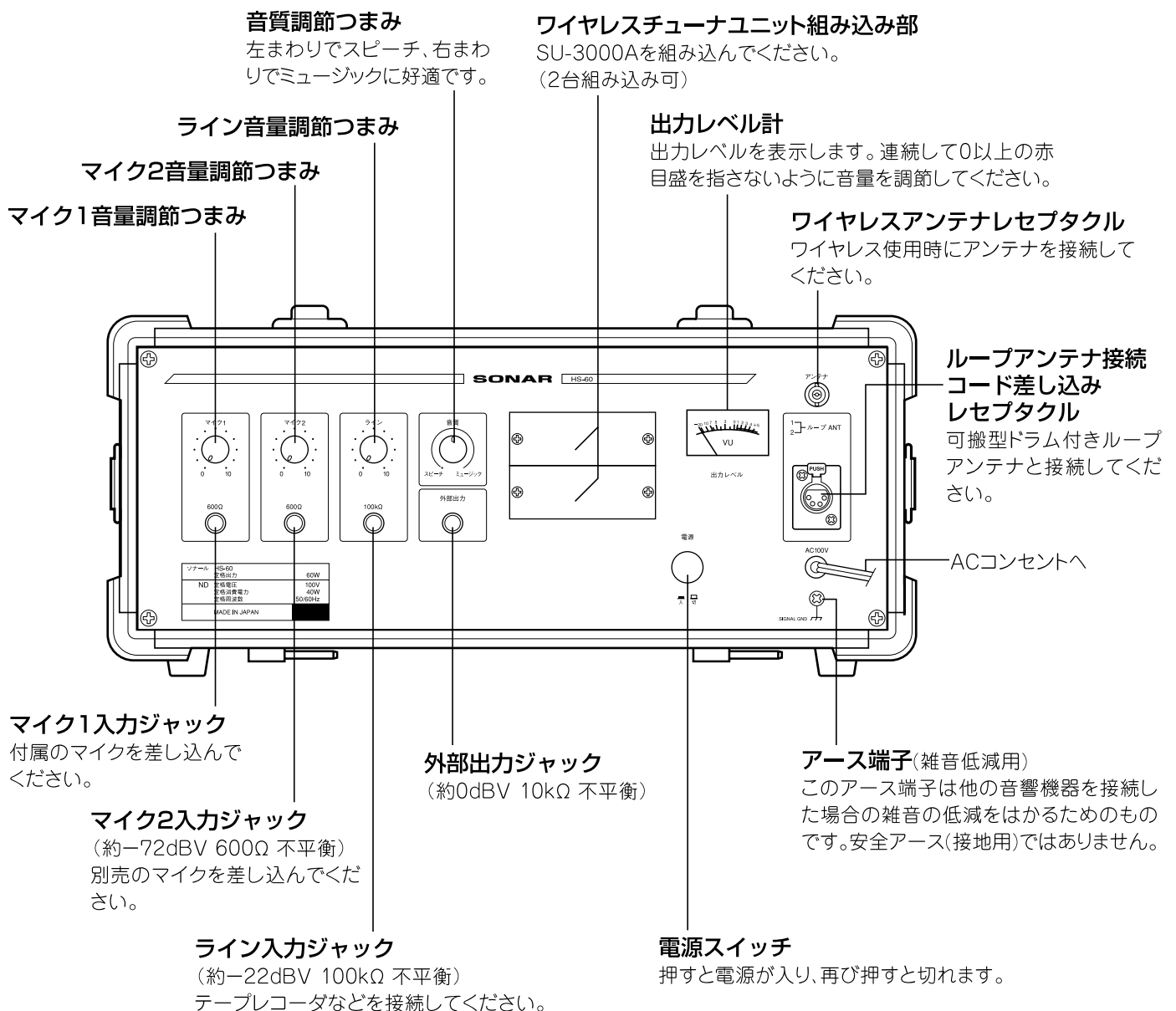


補聴器について

- ◎この装置に使用になる補聴器は、誘導コイル付き（電話マーク付き）のものをご使用ください。それ以外の補聴器は使用できません。
- ◎補聴器のスイッチの位置は、電話マーク、または「**T**」マーク位置にして使用します。
- ◎補聴器についての詳しい説明は補聴器の取扱説明書をご覧ください。

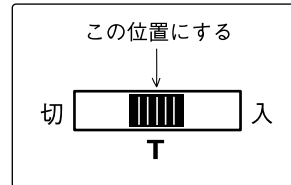

ループアンテナの使用法

- ◎可搬型ドラム付きループアンテナを図のように設置してください。
- ◎このループアンテナの中に入ると、補聴器より放送内容が聞こえます。
ループアンテナの外側では聞こえません。
- ◎このループアンテナの長さは20メートルです。
この長さで不足する場合は、別売りの延長アンテナ（20／30メートル）を準備しています。

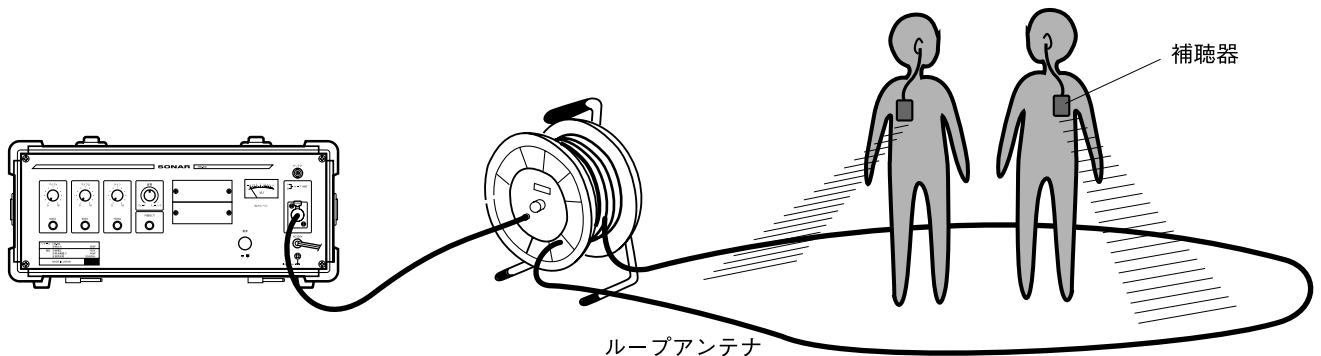


ワイヤレスマイク(別売)をご使用の場合

- ◎本機にはワイヤレスチューナユニット2個を組み込むことができます。
別売りワイヤレスチューナユニットSU-3000Aを組み込んでください。
- ◎ワイヤレスチューナユニット（SU-3000A）とワイヤレスマイク（WM-3000A・WM-3100）の周波数は、任意に設定可能です。
（詳しい設定方法につきましてはワイヤレスチューナユニット及びワイヤレスマイクの取扱説明書をご覧ください。）


【ご注意】

- ◎本機には2台のワイヤレスチューナユニットが組み込み可能ですが、周波数設定は、同一グループの別チャンネルに設定してください。
（SU-3000Aの詳しい周波数設定方法については、その取扱説明書をご覧ください。）

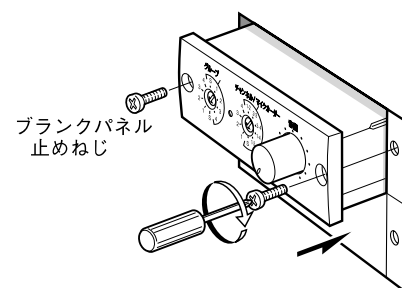


ワイヤレスチューナユニット SU-3000Aの取付方法

- ①ワイヤレスチューナユニット組込み部のブラックパネルをはずしてください。
- ②本体内部の4Pコネクタート同軸コネクタを取り出してください。
- ③右図のようにワイヤレスチューナユニットの4Pコネクタート同軸コネクタにしっかりと接続してください。
- ④チューナユニット組込み部に装着し、ブラックパネルを取り付けてあった2本のねじで固定してください。

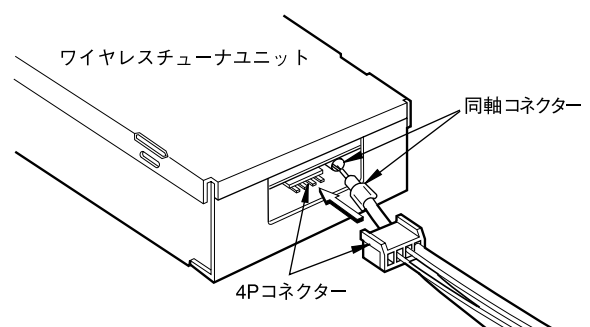

定 格

使 用 電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	40W（電気用品安全法による測定方法に基づく）
消 費 電 流	1.7A
出 力	定格60W 最大100W
出力負荷インピーダンス	ループ出力インピーダンス
外 部 出 力	約 0dBV 10k Ω 不平衡
ひ ず み 率	1%（1kHz 定格出力時）
周 波 数 特 性	80Hz～10kHz 偏差3dB（定格出力－10dB時）
音 量 調 節	100Hzに於いて－10dB（スピーチ時 1kHz基準） 10kHzに於いて－10dB（1kHz基準）調節器付
入 力 感 度 及 び インピーダンス	マイク1 約－72dBV 600 Ω 不平衡 音量調節機付 マイク2 約－72dBV 600 Ω 不平衡 音量調節機付 ライン 約－22dBV 100k Ω 不平衡 音量調節機付
信 号 対 雑 音 比	55dB
動 作 表 示	電源表示灯：緑 出力：VUメーターによる
使 用 温 度 範 囲	－10℃～＋50℃
外 装	パネル（鋼板）メタリックシルバーグレー塗装 ケース（アルミニウム製）アルマイト仕上 シルバー
寸 法	幅440mm 高さ191mm 奥行340mm
質 量	約 7kg
付 属 品	2極大型単頭プラグ 1、取扱説明書 1
セ ッ ト 構 成	本機、可搬型ドラム付きループアンテナ、 マイクロホン

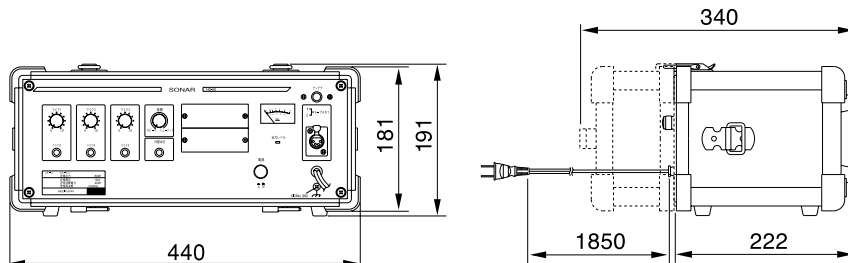

株式会社ソナール

【本社】

〒600-8815
京都市下京区中堂寺栗田町93
京都リサーチパーク6号館302
TEL:075-315-5561
FAX:075-315-5625

【東日本営業所】

〒235-0016
横浜市磯子区磯子2-17-17
TEL:045-753-6122
FAX:045-750-1255