


SONAR

小形ループアンプ HS-10SN

取扱説明書


このたびは ソナール小形ループアンプをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みになった後は後日のために保存しておいてください。

前面

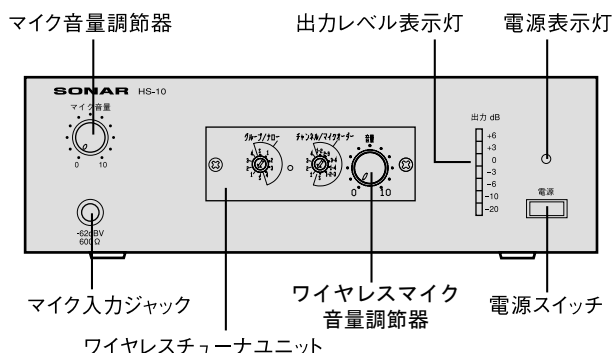


本機は磁気誘導により補聴器に電気信号を送ることで、補聴器を介して音声を伝えることができる小形ループアンプです。本機に接続して布設されたループアンテナの内側に位置する補聴器を装着した人へのみ情報を流すことができます。

- 使用する補聴器は電話マークの付いた誘導コイル付きのものが使用可能です。それ以外の補聴器は使用できません。
- 補聴器のスイッチの位置は、電話マーク、またはTマークの位置にして使用します。
- 補聴器についての詳しい説明は、補聴器の取扱説明書をご参照ください。

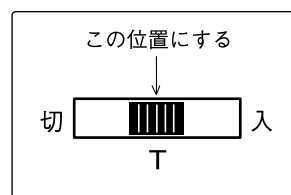


後面

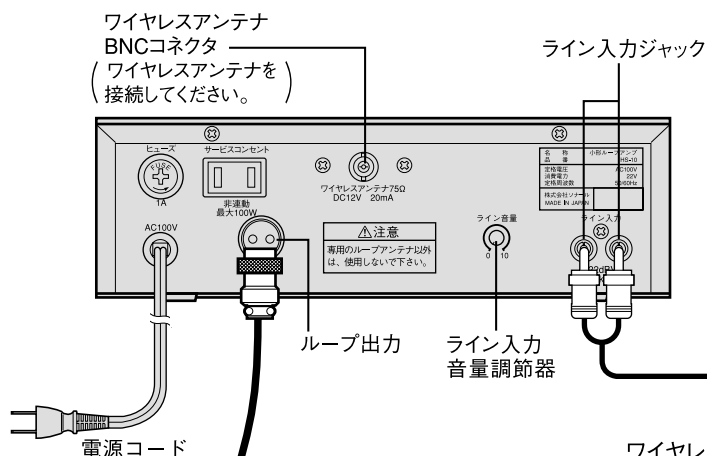

ライン入力
ミキサー、テレビ(ライン出力)
などの接続部です。

ミキサー

テレビ

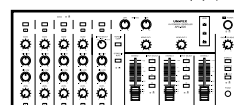


ループアンテナ

- [ループ出力]にループアンテナを接続します。
- 放送はこのループアンテナの内側にのみ行えます。
- [音量調節]により受信音量を調節できます。ループアンテナの内側で補聴器により受信してみて、適切に調節してください。

定 格

使 用 電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	22W (電気用品安全法による測定方法に基づく)
消 費 電 流	0.4 A
出 力	定格 10W
出力負荷インピーダンス	ループ出力インピーダンス
ひ ず み 率	5%以下
周 波 数 特 性	200Hz～10kHz ± 3 dB (定格出力 -10 dB時)
入 力 感 度 及 び イ ン ピ ー ダ ン ス	マイク -62 dBV ± 3 dB 600Ω 不平衡 音量調節器付き (前面) ライン -22 dBV ± 3 dB $10k\Omega$ 不平衡 音量調節器付き (後面)
信 号 対 雑 音 比	55dB以上
動 作 表 示	電源表示灯：赤 LED 出力レベル：7ポイント LED
使 用 温 度 範 囲	-10°C ～ $+50^{\circ}\text{C}$ (ワイヤレスチューナ使用時は 0°C ～ $+40^{\circ}\text{C}$)
外 装	パネル：(鋼板) ブラック塗装仕上げ カバー：(ビニールラミネート鋼板) 近似色ブラック
寸 法	幅 234mm 高さ 71.5mm 奥行 198mm
質 量	約 2.6kg
付 属 品	取扱説明書 1、取扱説明書安全編 1、8mループアンテナ 1 ワイヤレスチューナユニット SU-3000A ループ専用受信機 SOR-100 ワイヤレスアンテナ AA-382 ワイヤレスマイク WM-3000A 有線マイク MD-53

外 観 図

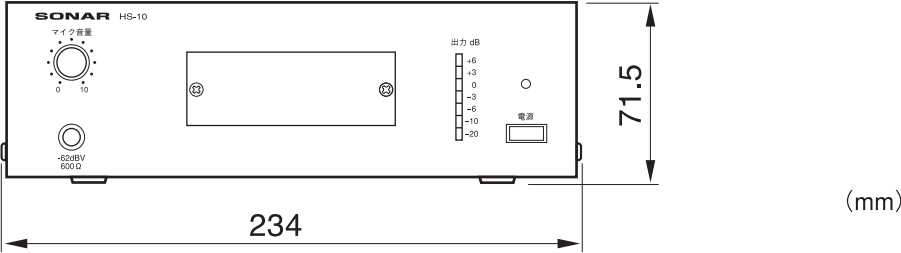

株式会社ソナール

【本社】
〒600-8815
京都市下京区中堂寺栗田町93
京都リサーチパーク6号館302
TEL:075-315-5561
FAX:075-315-5625

【東日本営業所】
〒235-0016
横浜市磯子区磯子2-17-17
TEL:045-753-6122
FAX:045-750-1255