



## 1 同梱品の確認



## 2 アンプ本体とループアンテナの接続

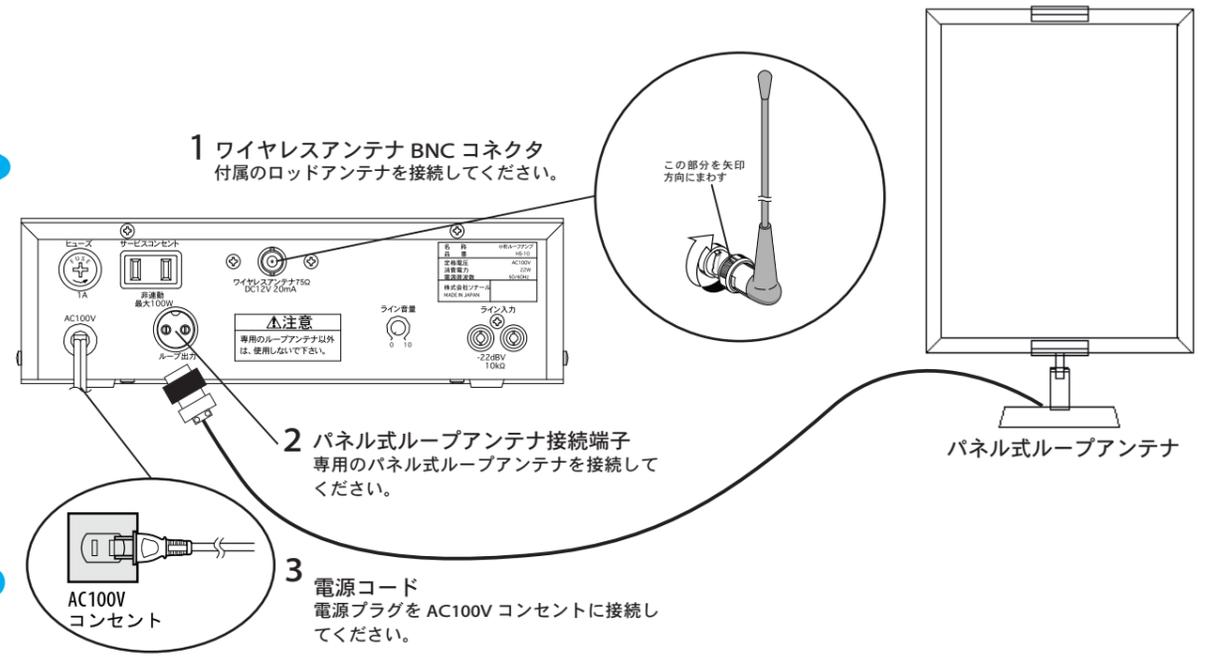

## 3 アンプ本体とマイクの接続

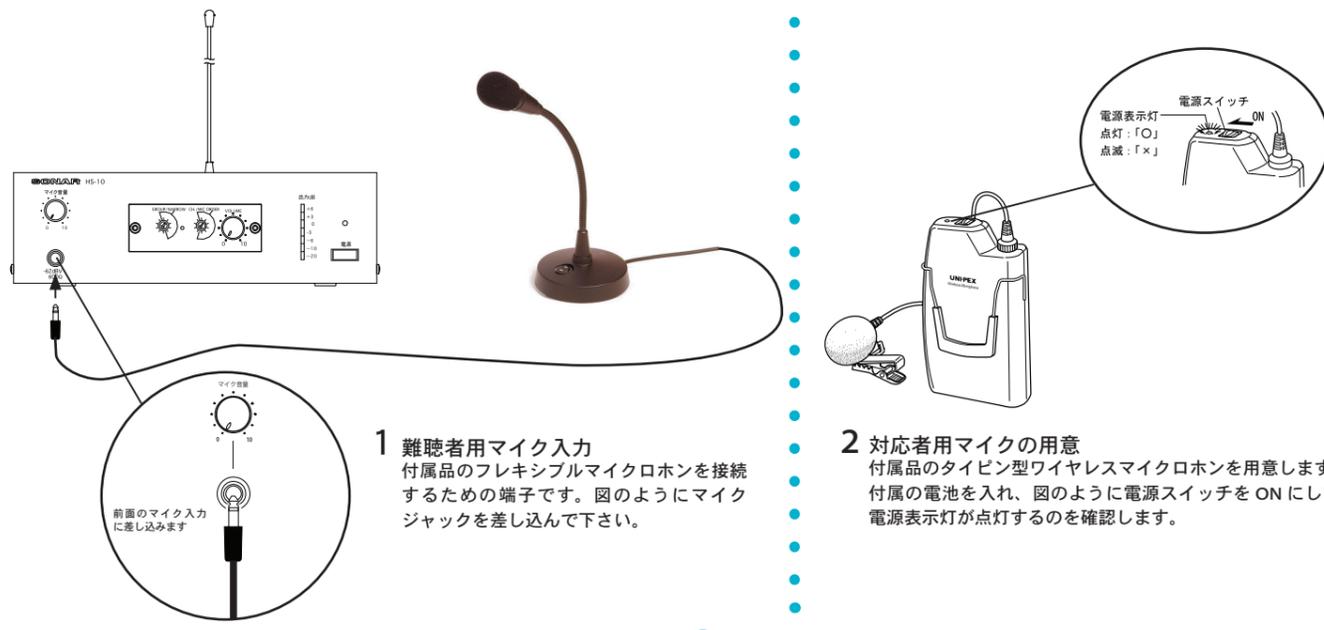

## 5 各機器の設置


各機器の設置は状況に応じて以下のように設置して下さい。

対応者用マイク (タイピン型ワイヤレスマイクロホン)  
対応者のマイクです。対応者のネクタイやポケットにマイククリップを取付けて下さい。


難聴者用マイク (フレキシブルマイクロホン)  
難聴者用のマイクです。利用者の正面にマイク設置して下さい。

パネル式ループアンテナ  
パネル正面を難聴者の補聴器又はループ受信機に向けて設置して下さい。

補聴器又はヒアリングループ受信機 誘導コイル付補聴器を持ってられない方には、ヒアリングループ受信機をお貸しください。

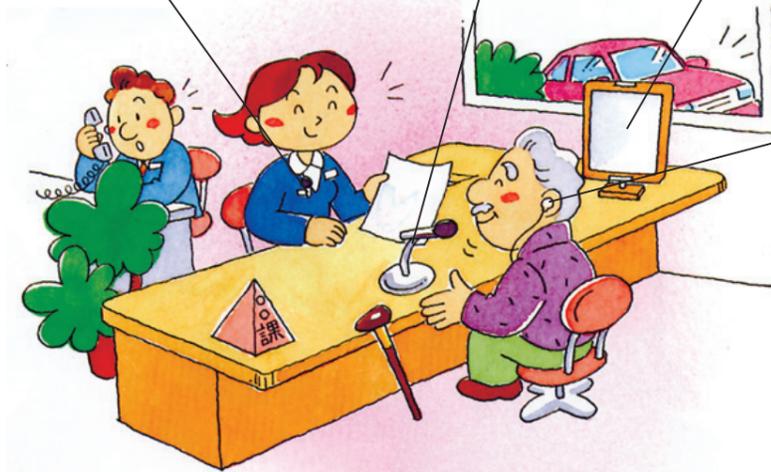


## 4 ヒアリングループ受信機の用意

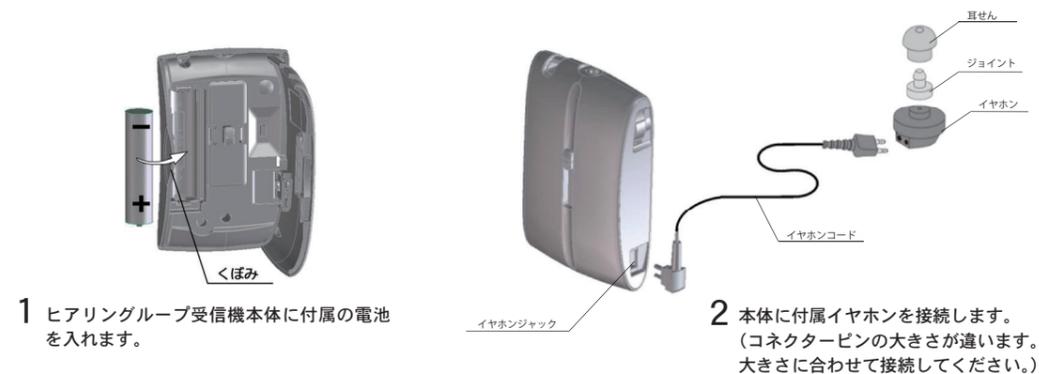

## 1 各機器の電源


### 1 ループアンプ本体の電源を入れます。

- 本体前面のスイッチを押して本体の電源を入れます。電源表示灯が点灯していることを確認してください。

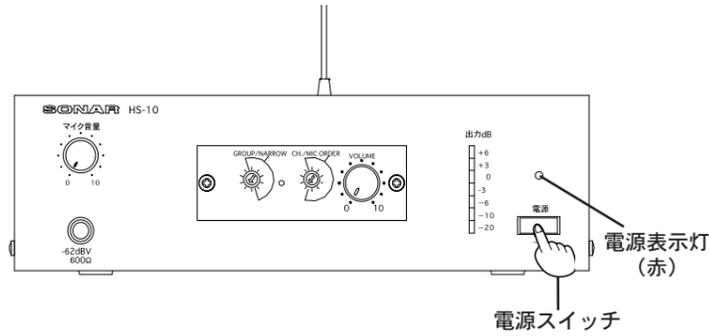

### 2 対応者用ワイヤレスマイクの電源を入れます。

- 本体の電源スイッチを入れ、電源表示灯が点灯すれば正常です。電源表示灯が遅い点滅または消灯する場合は使用している乾電池が消耗しています。新品の乾電池に交換して下さい。

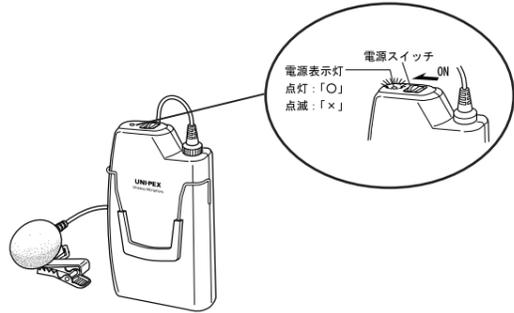

### 3 難聴者用の補聴器またはヒアリングループ受信機の電源を入れます。


- 誘導コイル付補聴器をお使いの方は、補聴器のスイッチをTまたはMTに切替えて下さい。

ボックス型補聴器 (例)      耳かけ型補聴器 (例)



注: 写真の補聴器は付属品ではございません

- ヒアリングループ専用受信機をお使いの方は、電源 SW 付き・音量ボリュームは「○」が電源 OFF (切) です。
- 音量大の方向へ回すとカチッとおとがして電源が入ります。

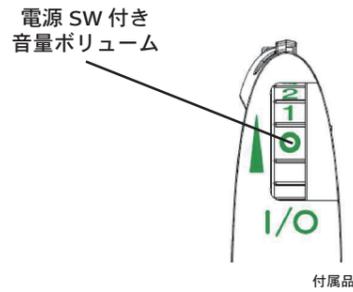

## 2 マイクの音量調節設定

### 1 難聴者用マイクのボリュームの設定



- マイク本体前面のスイッチを ON してマイクのスイッチを入れます。
- アンプ本体前面のマイク音量調節つまみを適当な位置に調節して下さい。
- 音量の大きさは補聴器または磁気ループ受信機で確認して下さい。

### 2 対応者用マイクのボリュームの設定

- アンプ本体前面のマイク音量調節つまみを適当な位置に調節して下さい。
- 音量の大きさは補聴器または磁気ループ受信機で確認して下さい。

### 3 出力レベル表示灯を見てボリュームの設定


- 出力レベルの表示を表示をします。緑色表示内が適正範囲です。連続して赤色が点灯しないように音量を調節してください。

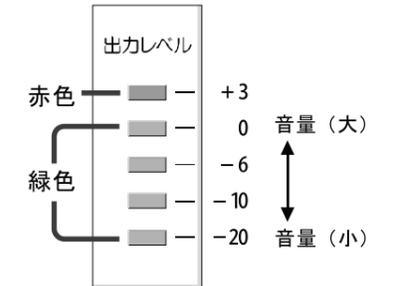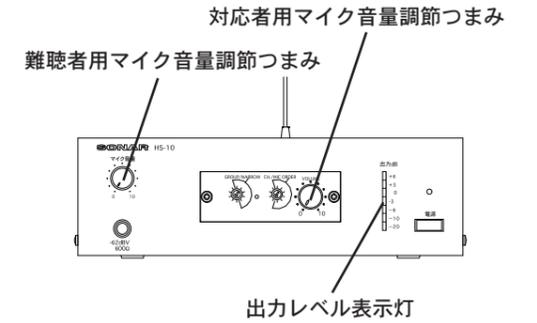

## 3 受信機の音量調節設定

### 1 補聴器またはヒアリングループ受信機の音量を調節します。

- 数字が大きくなると音も大きくなります。ちょうど良い大きさの位置に合わせてください。

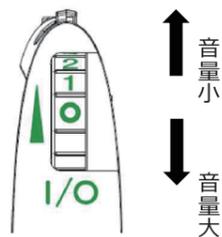


- 難聴者の方はそれぞれ聞えの状況が異なりますので、事前にチェックできれば、より確実な支援ができます。

## 4 ループアンテナの可聴範囲

### 1 パネル式ループアンテナ前の『聞こえ』の到達範囲内は可聴状態です。

- パネルから遠くなると磁界強度 (聞こえ) が弱くなります。補聴器または受信機の音量調節ボリュームで調節して下さい。

離れていてもしっかり聞こえます  
「聞こえ」の到達範囲

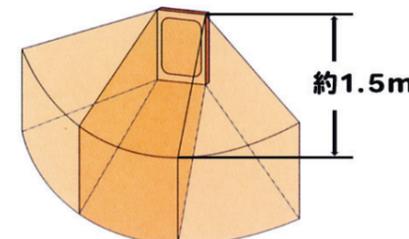

- やや聞き取りにくい方に対応します
- 非常に聞き取りにくい方にも対応します