


ヒアリンググループ受信機
SONAR SOR-100

取扱説明書

ご購入いただきありがとうございます。
この取扱説明書をお読みのうえお使いください。

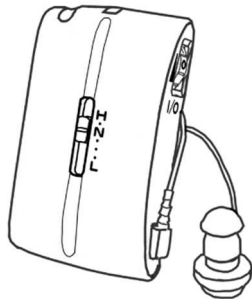

株式会社ソナール

〒600-8815 京都市下京区中堂寺栗田町 93
京都リサーチパーク 6 号館 302
TEL 075-315-5561 FAX 075-315-5625
http://www.sonar-loop.jp

保証書

品名 ヒアリンググループ受信機
型式 SOR-100
保障期間 お買上げ日より 1 年間
販売元 株式会社ソナール
〒600-8815
京都市下京区中堂寺栗田町 93
京都リサーチパーク 6 号館 302

ヒアリンググループ受信機について
保証期間中に正常な使用状態で
万一、故障が生じた場合には、
無償で修理いたします。
尚、次の場合には保証期間内でも
有料修理になりますのでご了承ください。



① 本書のご提示がない場合
② 火災・地震等の不可抗力による故障
③ 不当な扱いや落下による故障
④ 付属品の消耗による故障

お買上げ日	年	月	日
氏名	様		
住所	〒		
電話			

故障の際は、本体・付属品と一緒に本保証書を添えて販売店または株式会社ソナールへお申し付けください。

※ お買上げ日、氏名等はご自分でご記入ください。
※ 取扱販売店・住所・電話番号

仕様

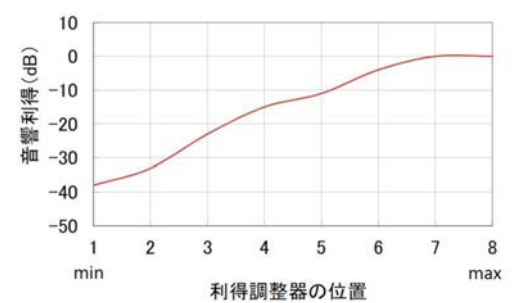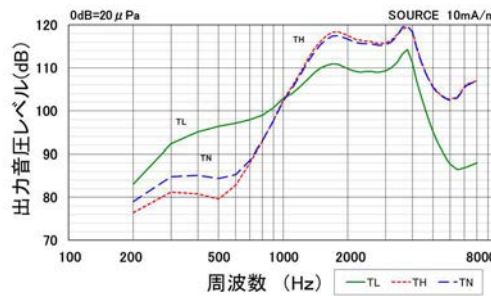

音質調整器の効果	自己調整方式 H~L 連続可変	イヤホン	120Ω
本体の大きさ	W50×H80×D20 (mm)	誘導コイル最大感度	96±6dB
重さ	約 60g (電池、イヤホン、コード、耳せん含む)	周波数範囲	200~5000Hz
電池の寿命約	170 時間	電池電流	7mA

故障かな?と思ったら ● 修理に出す前にお読みください

症状	対策
音が小さい 音が出ない 音がはっきりしない 雑音が出る	耳せんの耳垢を掃除する 電池の+、-が逆になっていないか点検する 新しい電池に交換してみる ボリュームを調整してみる 音質を調整してみる 新しいイヤホンコードと交換する コードの先端のピンのお手入れをする イヤホンを交換する

これらの対策で直らない時は販売店または株式会社ソナールへお問い合わせください。

ご注意



受信機は高温、水気、湿気を嫌います。ストーブの近くに放置したり、水の中に落としたり台所、浴室に放置しないよう注意してください。
また、ケースを開けると破損する可能性がありますので自分で内部機構に触れることはしないでください。
製造業者名 ミミー電子株式会社
製造業者住所 〒190-0003 東京都立川市栄町 6-16-1

ヒアリンググループ受信機の使い方

1.イヤホンコードを受信機に接続します。

イヤホンコードを「各部の名称」にある図のように受信機本体のイヤホンジャックに差し込みます。


2.電池を入れます。

本体側面のくぼみに指先をかけてトップカバーを開き電池の+と-の向きを合わせて、カバーを閉めます。



3.電源を入れます。

電源 SW 付き・音量ボリュームは「○」が電源 OFF (切) です。
音量大の方向へ回すとカチッと音がして電源が入り、音量が徐々に大きくなります。

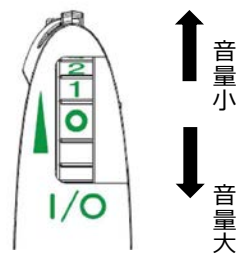


4.音質を調整します。

受信している音声等を聞きながら音質調整器をゆっくり動かして言葉がはっきり聞こえる位置に合わせます。

- (N) の位置は低音と高音がほぼ同じになります。
- (H) 側に動かすと高い周波数が強くなります。
- (L) 側に動かすと低い周波数が強くなります。

- ・言葉がこもる場合・音質調整器を (H) 側にゆっくり動かして聞き取りやすい所と定める。
- ・音がキンキン響く場合・音質調整器を (L) 側にゆっくり動かして聞き取りやすい所と定める。


一度聞き良い位置を決めても、聞こえ方は音声等の質によって常に変わります。音声が変わったら音質調整器をそのつど動かして、聞きながら自分に聞き良い位置を探してください。

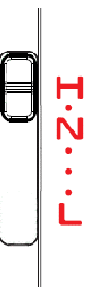

使用上のご注意

- 1.受信機を外したときは電池の消耗を早めないように電源スイッチを必ず切ってください。電池が消耗すると音が小さくなります。
- 2.ボリュームは話が分かる程度にしてご使用ください。聞きやすい程度でお使いになれば耳を悪くする事はありませんが必要以上に大きくしていると耳を痛めることがありますのでご注意ください。
- 3.長時間連続してお使いになると耳の疲労のために言葉が聞き取りにくくなる場合があります。このときは受信機を外してください。時間がたつと回復します。片耳だけ使わず反対の耳でもお使いください。
- 4.受信機を落としたり、イヤホンコードを引っかけたりすると受信機本体の故障の原因になる他、コードが内部で断線したり、イヤホンの性能が悪くなり、聞こえなくなる事がありますのでお取り扱いには十分ご注意ください。
- 5.お手入れはこまめに (一週間に一度位) してください。ほこり、耳垢が詰まっていると故障の原因になります。
- 6.トップカバーは電池の交換時以外はむやみに開閉しないでください。
- 7.使用する電池は単 4 乾電池 1 本です。ただし、メーカーによって多少大きさが異なるため、出し入れしにくいものがあります。

各部の名称

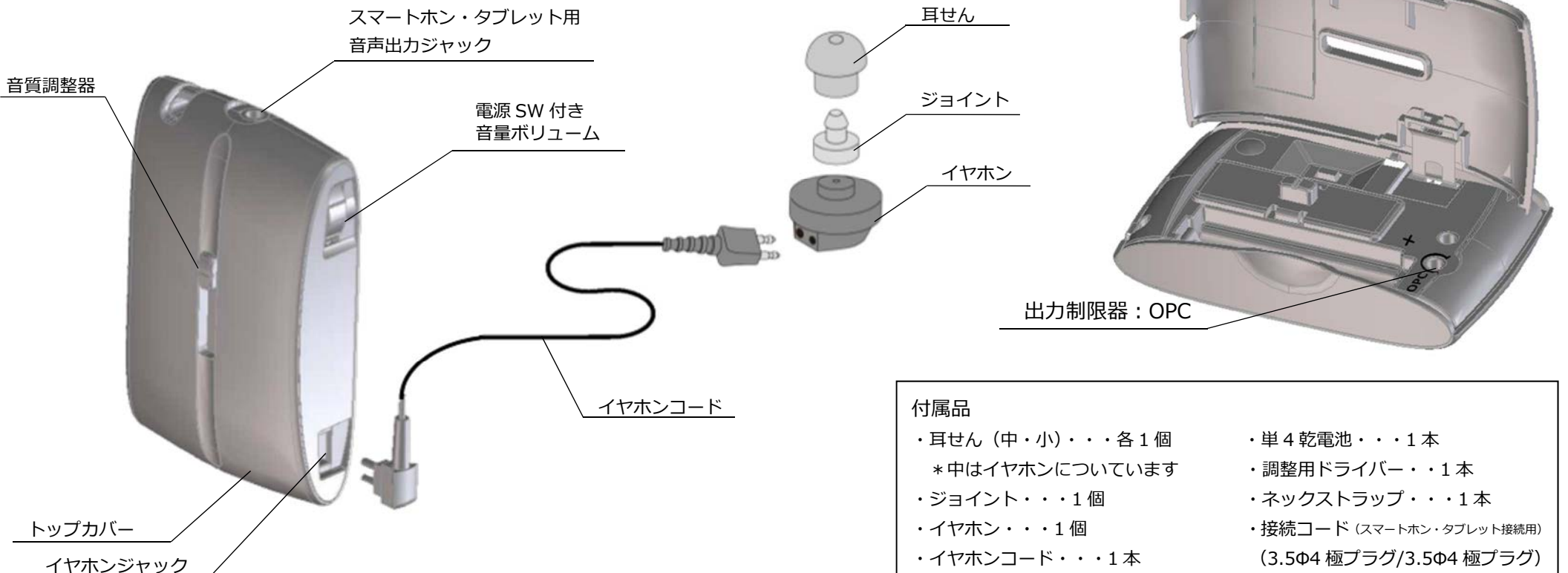

付属品

- ・耳せん (中・小)・・・各 1 個
- ・単 4 乾電池・・・1 本
- ・調整用ドライバー・・・1 本
- ・ジョイント・・・1 個
- ・イヤホン・・・1 個
- ・イヤホンコード・・・1 本
- ・ネクストラップ・・・1 本
- ・接続コード (スマートホン・タブレット接続用) (3.5Φ4 極プラグ/3.5Φ4 極プラグ)